

Podstawowe informacje

o odtwarzaczu dla niewidomych „Czytak Plus”

- instrukcja obsługi

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać włącznik/wyłącznik około 1 sekundę. Włączenie jest sygnalizowane jednym krótkim sygnałem dźwiękowym a wyłączenie podwójnym sygnałem. Klawisz REC włącza nagrywanie notatki głosowej jednocześnie zapalając czerwoną diodę a ponowne jego naciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania i zgaśnięcie diody.

Działanie klawiszy:

Klawisz 1 Zmiana trybu pracy (moduły „Czytak”, „teksty”, „audio”, „daisy”, „dyktafon”, „radio”), po wciśnięciu tego klawisza Czytak mówi, w jakim jest trybie

Klawisz 2 włączanie i wyłączanie odtwarzania książek oraz notatek

Klawisz 4 przechodzenie do poprzedniego odcinka książki lub poprzedniej notatki

Klawisz 6 przechodzenie do następnego odcinka książki lub następnej notatki

Klawisz 7 zmiana książki na poprzednią, wybór pamięci wewnętrznej w dyktafonie

Klawisz 9 zmiana książki na następną, wybór karty pamięci w dyktafonie

Klawisz 5 głośniej

Klawisz 8 ciszej

Klawisz 0 informacje o słuchanej książce

Klawisz *0 „Odtwarzanie ciągle” lub „Zatrzymaj pomiędzy odcinkami”